

非接触温度測定装置

D10

取扱説明書



安全上の注意

警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

-  落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
-  接続端子に手や指などの身体の一部が触れないようにしてください。感電・障害・故障の原因となる場合があります。
-  機器から発熱や煙、異臭がするなどの異常が発生した場合は、ただちに電源プラグを抜いてください。異常状態のまま使用すると、火災・感電の可能性があります。
-  異物(水・金属片・液体など)が機器内部に入った場合は、ただちに電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の可能性があります。
-  所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
-  水などの液体をかけないでください。また、水がかかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用はしないでください。感電の可能性があります。
-  自動車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。
-  乳幼児の手が届く場所に置いたり、設置したりしないでください。事故や障害の原因となる可能性があります。
-  自動車やバスなどの外側に取り付けて設置しないでください。道路交通法違反となるだけでなく、事故や障害の原因となる可能性があります。
-  使用中に煙が出たり、過剰に発熱しているなどの異常が起きた場合には、直ちに使用を止めて燃えやすいものから遠ざけてください。発火・破裂・火災の原因となります。

注意

下記の注意を守らないと、けがや周囲の物品に損害を与えることがあります。

-  壁などへの設置は本機の重量に十分耐えられる強度があることをお確かめください。十分な強度がないと、落下して大けがの可能性があります。
-  ぐらついた台の上などに設置すると、倒れて落下し、けがをしたり、機器を破損する可能性があります。
-  充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布などをかぶせたり包んだりしないでください。
-  給電用変換ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用しないでください。発火・火災・感電・故障の原因となります。
-  直射日光の当たる場所や炎天下の車内、暖房機の近くなど高温となる場所に設置しないでください。内部の温度が上がり、火災や故障の可能性があります。
-  接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となります。



Li-ion

危険

D10の内蔵電池はリチウムイオン電池です。必ず下記をお読みになってからご使用下さい。

-  液漏れして皮膚や衣類に付着した場合は、傷害を起こす恐れがありますので直ちに水で洗い流して下さい。また、目に入った場合には失明の恐れがありますのでこすらずに大量の水で洗い流した後、直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないようにして拭き取ってください。
-  内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合は寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。電池は内蔵型のため、弊社でお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

同梱物

- ・D10本体
- ・充電用USBケーブル
- ・取付用マジックテープ
(マグネットがつかない場所取付用)

事前準備



付属のUSBケーブルで充電を行ってください(電源アダプタは付属していません)。残量がゼロの場合には、最長で2時間半かかります。



USBケーブル(付属)



電源アダプタ(別売)

操作方法



電源ボタンを押すと、電源をON/OFFできます。

「+」ボタンを押すと、言語の切替ができます。

日本語・英語・中国語・スペイン語の順に切り替わります。

「-」ボタンを押すと、摂氏と華氏の切替ができます。

「+」ボタンを長押し(5秒間)すると、バージョンチェック
できます。

「-」ボタンを長押し(5秒間)すると、ミュートON/OFFで
きます。

●時計調整

電源ボタンを長押し、「+」「-」ボタンで調整後、電源ボ
タンにより確定します。

●LED

「赤」点灯 … 充電中

「緑」点灯 … USB通電中(充電完了)

測定方法



30cm程度



D10の正面、30cm程度の位置に額や、手
首をかざして測定します。

アナウンスの内容:
(35.0°C~42.0°C)

正常時(37.5°C未満) 「正常です」
異常時(37.5°C以上) 「異常です」

ディスプレイ表示:

35.0°C未満 「Lo」
42.0°C以上 「Hi」
(「Lo」「Hi」の時はアナウンスは流れません)

仕様

充電	USB給電 DC5V 500mA
バッテリー	3.7V 2200mAh
測定距離	25cm ~ 30cm
測定時間	1秒以下
測定精度	35℃ ~ 42℃ ±0.2℃
測定環境	0℃ ~ 45℃
稼働時間	30時間以上(使用状況により変わります)
充電時間	2時間半以下
設置方法	マグネット, カメラ用三脚, マジックテープ
サイズ	120mm × 69mm × 28mm
重さ	118g

保証書

納品日から下記期間内に故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの弊社に修理をご依頼下さい。

品名	非接触温度測定装置 D10
保証内容	納品日から 1年
シリアルナンバー	
納品日	年 月 日
お客様 お名前・ご住所	
弊社	

以下の場合には、保証期間であっても有償修理となります。

- ・マニュアルに記載がない方法で設置、使用、保守または保管した事による製品の故障または損傷
- ・不正な改造を行った場合
- ・分解と修理を行った場合
- ・異常電圧、高温、浸水、錆などの偶発的な要因または、人的な要因によって引き起こされた製品の故障または損傷
- ・納品後の輸送及び積み下ろし時に発生した損傷
- ・地震、火災、洪水、落雷などの不可抗力による製品の故障または損傷
- ・製品の設計、技術、製造、品質によらないその他の故障または損傷